

Bir doz aldığında ilacı hissetmiyorum veya tadını almıyorum. Tam dozumu aldığımı nasıl bilebilirim?

Solunum aletinden gelen ilaç miktarı çok azdır, bu yüzden ilacı hissetmemeniz veya tadını almamanız gayet normaldir. İçinize çektiğinizde ilaç, nefesiniz yoluyla akciğerlerinize gider. Birkaç dakika içerisinde daha rahat nefes almaya baslarsınız.

Yeni bir Solunum aleti kullanmaya başladığımda tam olarak ne yapmalıyım?

Solunum aletinizi ilk defa kullanıyorsanız aynı işlemi normalde olduğu gibi gerçekleştirmeli, ancak bu kez peş peşe iki kere yapmalısınız. Bu yüzden kırmızı kulbu ilk olarak sağa sonra sola sonra tekrar sağa ve son olarak bir kez daha sola döndürün. Bunun ardından içinize çekmek istediğinizde sadece bir kez sağa ve bir kez sola döndürün.

Solunum aleti bakımı

Solunum aletim kötü kokuyor. Bu normal midir?

Solunum aletinin farkedilebilir bir kokusu olmaması gerekir. Kötü kokuyorsa küflenmiş olabilir. Kullanmayın. Doktorunuzdan hemen yeni bir Solunum aleti reçetesi yazmasını isteyin. Solunum aletinize gereken özeni göstermek çok önemlidir. Her kullanımdan sonra koruyucu kapağı değiştirin. Ağızlığın dış kısmını düzenli olarak kuru bir bezle silin. Asla ağızlığın içine doğru nefes vermeyin. Ağızlık asla gereksiz yere yıkanmamalı, sökülmemeli veya döndürülmemelidir.

Solunum aleti nem/su ile temas ederse ne olur?

Solunum aleti, su ile temas etmemesi gereken ince kuru toz halindeki ilaçtan oluşur. Solunum aletinizin bakımı için bu, ağızlığın dış kısmını haftada bir kez kuru bir bezle silmeniz gerektiği anlamına gelir. Ayrıca Solunum aleti ağızlığının içine nefes vermemeniz gerektiği anlamına da gelir. Nemli hava, ilacın etkinliğini azaltır.

Solunum aletimi en iyi şekilde nasıl saklarım ve Solunum aleti ne kadar süre kullanılabilir?

Solunum aleti 30 derecenin altındaki sıcaklıkta ve kuru ortamda saklanmalıdır. Son kullanma tarihinden sonra solunum aletini kullanmayın. Bu tarih, kutunun üstündeki EXP ifadesinden sonra bulunabilir. Burada ay ve yıl yazılıdır. Söz konusu ayın son günü, son kullanma tarihidir.


Solunum aletimin doğru kullanım şekli nedir?

1




Koruyucu kapağı gevşetin ve çıkartın. Doz göstergesinden, kalan doz sayısını kontrol edin.

2



Solunum aletini dik bir şekilde tutun ve beyaz bölümü bir elinizle güvenli bir şekilde tutun. Diğer elinizle **tık sesini duyana kadar** kırmızı kulbu önce sağa sonra sola döndürün.

3

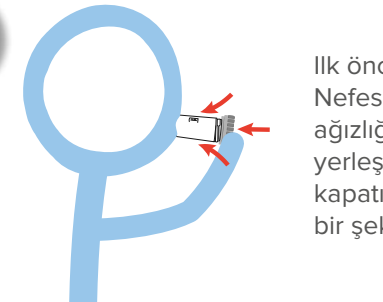

İlk önce nefes verin. Nefes verdikten sonra ağızlığı dişlerinizin arasına yerleştirin, dudaklarınızı kapatın ve derin ve güçlü bir şekilde nefes alın.

Solunum Aleti Hakkında Sık Sorulan Sorular

Doz göstergesi

Yeni bir Solunum aleti zamanı geldiğini nasıl bilirim?

Doz göstergesinde kırmızı kutu çıktığını görürseniz 20 doz kalmış demektir. Kırmızı kutu, yeni bir reçete almanız için hatırlatmadır. Doz sayacı penceresi tamamen kırmızı olduğunda ve üzerinde 0 yazdığına Solunum aletiniz boştur ve, yenilenmesi gerekir.

Doz göstergesini anlamıyorum ve hareket ettiğini göremiyorum?

Doz göstergesi, Solunum aleti içerisinde yaklaşık kaç doz kaldığını bildirir. Doz göstergesi her doz yüklemenizde çok yavaş bir şekilde hareket eder (geri sayar), ayrı ayrı her dozda bu mesafeyi görmek zordur. 5 ya da daha fazla dozdan sonra göstergenin ilerlediğini görebiliyor olmalısınız.

Solunum aleti boş, fakat Solunum aletini salladığımda hala içinde toz varmış gibi bir ses duyuyorum?

Solunum aleti boşken bile bu sesi duymaya devam etmeniz normaldir. Bunun sebebi ilaç değildir, Solunum aletinizin içinin kuru kalmasına yardımcı olan kurutucu ajandır. Bu nedenle, çıkan ses Solunum aletinizin içinde bir miktar ilaç kaldığını göstermez.

Dozu yüklemek ve içinize çekmek


Doktorum tık sesinden sonra içime çekmemi söyledi ancak tık sesini açıkça duyamıyorum?

Kırmızı kulbu döndürerek dozu yüklediğinizde normalde "tık" sesini duymanız gerekir. Ancak bu "tık" sesinin şiddeti değişebilir ve bazen duyulması zor olabilir. Kırmızı kulbu önce sağa sonra sola döndürürseniz tık sesini duymasanız bile doz doğru bir şekilde yüklenir.

Solunum aletini yüklediğimde tık sesini duyduğumdan emin değilim. Solunum aletini ikinci sefer döndürüp tık sesini duyarsam yanlışlıkla 2 doz almış olur muyum?


Hayır. Solunum aletinin tasarımı, bir seferde birden fazla doz yüklemesine veya alımına olanak vermemektedir.

4

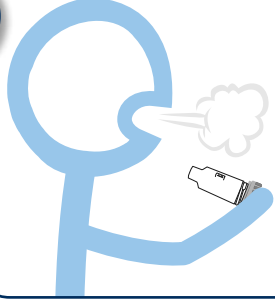


Solunum aletini ağızınızdan çıkartın, 7-10 saniye boyunca nefesinizi tutun ve sonra nefes verin.

5

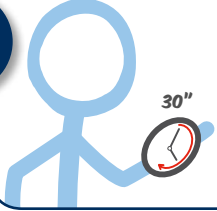

Birden fazla doz almanız gerekiyorsa 2., 3. ve 4. adımları 30 saniye sonra tekrar edin.

6

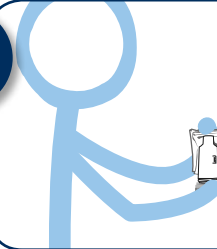

Solunum aletini kuru bir bez ile temizleyin; su ile temas ettirmekten kaçınınız. Koruyucu kapağı kapatın ve kuru bir ortamda saklayınız.

7



Son olarak, ağızınızı suyla çalkalayınız.